

**●●● SAFRAN EN POWDRE ●●●**

Fabricant : Laurypath, système de management certifié ISO 13485.

1. RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT	PHOTO PRODUIT
44140-12P	Flacon de 10 grammes	
44140-13P	Flacon de 25 grammes	

2. COMPOSITION

Origine : Crocus Sativus Linnaeus, Sargol (S1), produit en IRAN

Safran en poudre de catégorie I selon la norme ISO 3632-2

La poudre de Safran est obtenue par broyage à froid avec un tamis de 250µm des stigmates de Crocus Sativus Linnaeus de couleur rouge.

3. CONSEILS D'UTILISATION

Pour préparer une solution alcoolique de safran :

- Diluer 5 grammes de poudre de safran dans 1 litre d'éthanol absolu.
- Placer la solution 2 heures à l'étuve (37°C) après dissolution de la poudre dans l'alcool. La solution obtenue sera plus concentrée et stable.

4. SÉCURITÉ - PRÉCAUTIONS D'UTILISATION – STOCKAGE

Stocké dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur, de l'humidité et protégé de la lumière.